

 <p>RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR</p>		PENGIRIMAN SPESIMEN RUJUKAN		
Standar Prosedur Operasional		No. Dokumen : 66.2.16/SPO.IPK.16/9/2022	No. Revisi : 1	Halaman : 1/2
Pengertian	Pengiriman spesimen adalah tata cara penyiapan dan pengemasan spesimen untuk dikirim ke laboratorium rujukan			
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan dan menyiapkan spesimen yang memenuhi syarat pengiriman untuk menunjang perolehan hasil tes laboratorium yang bermutu dan dipercaya. 2. Sebagai panduan mengirim spesimen secara benar agar tidak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam spesimen. 			
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Nomor: 445 / Kep.25.28.14 / 410.205/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium Klinik di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. 2. Keputusan Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Nomor 445/Kep.25.28.1/410.205/2020 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium Klinik Instalasi Patologi Klinik RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. 			
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spesimen yang dikirim disertai surat pengantar /formulir pemeriksaan laboratorium. Pada surat pengantar /formulir permintaan pemeriksaan laboratorium sebaiknya memuat secara lengkap: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal permintaan b. Identitas pasien (nama, umur, jenis kelamin, alamat) termasuk rekam medik. c. Identitas pengirim (nama, alamat) bila diperlukan no telp 			

Ditetapkan,
Direktur RSUD Mardi Waluyo
Kota Blitar

PEMERINTAH
RUMAH SAKIT
UMUM TERAPAN
MARDI WALUYO

dr. MUHAMMAD MUCHLIS, MMRS
NIP.196509122002121004



**RSUD MARDI
WALUYO
KOTA BLITAR**

PENGIRIMAN SPESIMEN RUJUKAN

No. Dokumen :

66.2.16/SP0.PK.16/9/2022

No. Revisi :

1

Halaman :

2/2

d. Diagnosis/keterangan klinik

e. Jenis spesimen

f. Pemeriksaan laboratorium yang diminta

2. Wadah pesimen yang dikirim, ditempatkan dalam wadah yang dilabel identitas pasien (nama, umur, jenis kelamin, alamat ,nomer rekam medik), tanggal pengambilan spesimen, identitas pengirim. Wadah harus bersih, kering, terbuat dari plastik/gelas. Untuk rujukan kultur, menggunakan media transport yang sudah disediakan laboratorium rujukan
3. Pasien/keluarga pasien di beberi informasi serta menandatangani persetujuan bahwa dikirim ke laboratorium rujukan dan pemberitahuan adanya hubungan antara dokter yang merujuk dengan pelayanan laboratorium diluar rumah sakit
4. Waktu setiap hari kerja
5. Pengirim spesimen dikirim melalui jasa servis laboratorium rujukan yang sudah ada kerjasama dengan RSUD Mardi Waluyo
6. Suhu pengiriman_dikirim ke laboratorium/ rumah sakit rujukan pada suhu :
 - a. Pemeriksaan kimia klinik: $2 - 8^{\circ}\text{C}$
 - b. Pemeriksaan Imuno/ serologi: $2 - 8^{\circ}\text{C}$
 - c. Pemeriksaan Hematologi: Suhu kamar
 - d. Kultur darah: Suhu kamar
 - e. Kultur urine : $2 - 8^{\circ}\text{C}$
 - f. Kultur faeces: Suhu kamar
 - g. Kultur pus: $2 - 8^{\circ}\text{C}$
 - h. FI, Darah samar: $2 - 8^{\circ}\text{C}$

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Perawatan Intensif
5. Instalasi Hemodialisa